


Domus 4

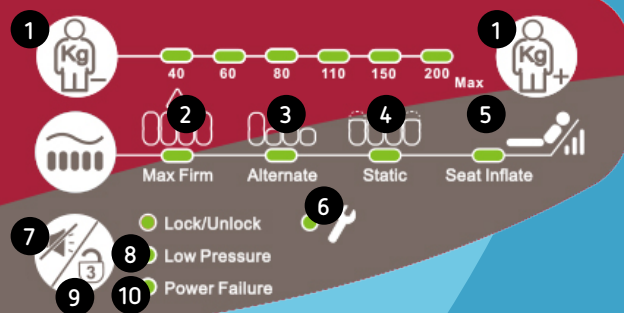

Aan/uit knop bevindt zich aan de zijkant van de pomp.

1 Kg+- en Kg-

Druk op Kg+ of Kg- om het gewicht van uw cliënt in te stellen.

2 Max Firm

De Zorgstand; Luchtcellen zijn maximaal gevuld met lucht. Na 20 minuten keert de pomp terug naar de vooraf ingestelde therapie. Deze stand gebruiken bij het verlenen van zorg of maken van transfers.

3 Alternate

De therapie wisseldruk is ingeschakeld. Luchtbanen vullen zich om en om met lucht.

4 Static

De therapie wisseldruk is uitgeschakeld. Luchtbanen zijn nu allen gevuld met lucht.

5 Seat inflate

Deze stand kan bij Alternate en Static worden gebruikt. De cellen onder de stuit vullen zich maximaal met lucht. Op deze manier wordt 'doorzakken' voorkomen. Gebruik deze stand als de cliënt zittend in bed verblijft.

6 Service

Als dit lampje brandt, dan is er een technische storing. Neem contact op met Harting-Bank.

7 Alarm

Druk 1 seconde op de linkerzijde van de knop om het geluid van het alarm uit te zetten.

8 Low Pressure

Als dit lampje brandt, dan zit er onvoldoende lucht in het matras. Controleer of beide CPR's zijn gesloten.

9 Lock/Unlock

Druk 3 seconden op de rechterzijde van de knop om het systeem te vergrendelen of ontgrendelen.

10 Power Faillure

Als dit lampje brandt, controleer dan of de stekkers juist zijn aangesloten.

Installatie

Verwijder het bestaande matras. Leg de rode zak op de bedbodem en rol de Domus 4 uit. Aan het voeteneind zit de slangenset. Hang de pomp aan het voetebord. Voer de slangenset indien mogelijk onder het voetbord door en sluit aan op de pomp. Er zijn 2 CPR's aanwezig (gele flappen links bij hoofdeinde) deze dienen gesloten te zijn. Zet de pomp aan, stel het juiste gewicht in en wacht tot de lampjes bij Kg+ en Kg- (1) niet meer knipperen. Uw cliënt kan op het matras liggen.

Opruimen

Open beide CPR's en koppel de pomp los. Zodra het matras leeg is, biedt u deze aan bij Harting-Bank in de rode zak. Schrijf het nummer van de pomp op de rode zak.

Transportfunctie

Ontkoppel de slang van de pomp bij transport van het bed en het matras. Zet het matras in Static stand (4) vóórdat u het systeem ontkoppeld, om alle luchtcellen te vullen. Sluit de slang af met de afdekdop, zodat het matras minder snel leeg loopt. De lucht verdeelt zich nu gelijkmatig in het matras. U kunt maximaal 4 uur gebruik maken van de transportfunctie.