



Aan/uit knop bevindt zich aan de zijkant van de pomp.

1 Cycle Time

Bepaal de duur van de Alternate functie. Na 30 minuten keert de pomp terug naar de Static modus.

2 Comfort

Druk op de pijlen om het gewicht van uw cliënt in te stellen. (1=30kg / 10=180kg)

3 Autofirm

De Zorgstand; Luchtcellen zijn maximaal gevuld met lucht. Na 20 minuten keert de pomp terug naar de vooraf ingestelde therapie. Deze stand gebruiken bij het verlenen van zorg of maken van transfers.

4 Alternate

De therapie wisseldruk is ingeschakeld. Luchtbanen vullen zich om en om met lucht.

5 Static

De therapie wisseldruk is uitgeschakeld. Luchtbanen zijn nu allen gevuld met lucht.

6 Seat Inflation

Deze stand kan bij Alternate en Static worden gebruikt. De cellen onder de stuit vullen zich maximaal met lucht. Op deze manier wordt 'doorzakken' voorkomen. Gebruik deze stand als de cliënt zittend in bed verblijft.

7 Alarm

Druk 1 seconde op de knop om het geluid van het alarm uitzetten.

8 Low Pressure

Als dit lampje brandt, dan zit er onvoldoende lucht in het matras. Controleer of de CPR's gesloten zijn.

9 Service

Als dit lampje brandt, dan is er een technische storing. Neem contact op met Harting-Bank.

10 Lock/Unlock

Druk 5 seconden op de knop om de pomp te vergrendelen/ontgrendelen.

11 Faillure

Als dit lampje brandt controleer dan of de stekkers juist zijn aangesloten.

Installatie

Verwijder het bestaande matras. Leg de rode zak op de bedbodem en rol de PM320 uit. Aan het voeteneind zit de slangenset. Hang de pomp aan het voetebord. Voer de slangenset indien mogelijk onder het voetbord door en sluit aan op de pomp. Er zijn 2 CPR's aanwezig. Deze dienen gesloten te zijn. Zet de pomp aan en wacht tot lampjes bij Comfort (2) niet meer knipperen. Uw cliënt kan op het matras liggen. Stel het juiste gewicht in.

Opruimen

Open beide CPR's en koppel de pomp los. Zodra het matras leeg is, biedt u deze aan bij Harting-Bank in de rode zak. Schrijf het nummer van de pomp op de rode zak.

Transportfunctie

Ontkoppel de slang van de pomp bij transport van het bed en het matras. Zet het matras in Static stand (5) vóórdat u het systeem ontkoppeld, om alle luchtcellen te vullen. Koppel de slangen aan elkaar vast, zodat het matras minder snel leeg loopt. De lucht verdeelt zich nu gelijkmatig in het matras. U kunt maximaal 4 uur gebruik maken van de transportfunctie.